

# Richtiger Umgang mit der FFP2-Maske

## Correct handling of the FFP2 mask



- ▶ **Hände vor dem Anlegen gründlich reinigen.**  
*Clean hands thoroughly before putting on.*



- ▶ **Mund und Nase mit der Maske bedecken und auf dichten Sitz achten. Nasenbügel andrücken und Bänder straffziehen.**  
*Cover the mouth and nose with the mask and ensure a tight fit. Press on the nose clip and pull the straps tight.*



- ▶ **Während des Tragens Maske nicht mit den Händen berühren. Tragezeitempfehlungen des Herstellers beachten. Maske wechseln, wenn diese durchfeuchtet ist.**  
*Do not touch the mask with your hands while wearing it. Follow the manufacturer's recommendations for wearing time, change the mask at the latest when it is soaked through.*



- ▶ **Maske an den Bändern von hinten nach vorne abnehmen, Masken-Vorderseite dabei nicht berühren.**  
*Remove the mask by the straps from front to back, avoiding touching the front of the mask as much as possible.*



- ▶ **Einmalmaske in einem geschlossenen Abfallbehälter entsorgen.\***  
*Dispose of disposable mask in a closed waste container.*



- ▶ **Hände gründlich reinigen.**  
*Clean hands thoroughly.*

\* FFP2-Masken sind in der Regel Einmalartikel, die grundsätzlich nach dem Tragen entsorgt werden sollten. Sie können die Tragezeit jedoch in begrenztem Umfang verlängern, wenn Sie die Maske regelmäßig wechseln und abtrocknen lassen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Masken untereinander nicht verwechselt werden können und diese an einem sicheren, möglichst hellen und belüfteten Ort aufbewahrt werden (keine Schreibtischschublade, keine Kunststoffüte!). Defekte und sichtbar verunreinigte Masken sind in jedem Fall zu entsorgen.